

Handleiding SensiView



Barry Emons

Index

Gebruiksvoorschriften	Pagina 3
Mogen we aan u voorstellen, de SensiView	Pagina 4
Aan de slag met de SensiView	Pagina 5
Gebruiksaanwijzing	Pagina 6

Gebruiksaanwijzing

Algemeen

- Lees deze veiligheidsvoorschriften en de gebruiksaanwijzing door vóór gebruik van het apparaat aandachtig door. Sluit pas na het lezen van dit document het apparaat aan op het lichtnet
- Zet de Sensiview altijd op de juiste manier uit voordat u de stroom eraf haalt.
- Laat de Sensiview na gebruik een aantal minuten afkoelen voordat deze verplaatst wordt.
- De SensiView maakt gebruik van een projector. Bij transport moeten schokken worden vermeden. Harde schokken of stoten kunnen de lamp van de projector permanent beschadigen (denk hierbij aan vervoer over drempels of buitenshuis).

Plaatsing

- Plaats het apparaat op een droge, goed geventileerde en vlakke ondergrond. Vermijd altijd direct zonlicht. Vocht en/of een te hoge temperatuur kunnen leiden tot storingen in de elektronica.

Ventilatie

- Zorg, wanneer u het apparaat installeert, voor voldoende ventilatie. Houd een halve meter vrij rondom de behuizing, met name aan de zijkanten.
- Plaats nooit een voorwerp, zoals bijvoorbeeld een doos, over de SensiView als deze in gebruik is.

Reiniging

- De SensiView kan het beste worden schoongemaakt met een oplossing van wasmiddel en een zachte, niet pluizende doek. In geen enkel geval mogen oplosmiddelen als thinner, terpentine en alcohol worden gebruikt.
- Gebruik een niet te vochtige doek om het doordringen van water in het apparaat te voorkomen. Dit kan kortsluiting veroorzaken.
- Let op! De lens is zeer gevoelig voor krassen. Let er tijdens het schoonmaken op dat u deze niet beschadigt.

Mogen wij aan u voorstellen, de SensiView

De SensiView is een mobiele beleef-unit voor projecties op plafond of wand. Door middel van kamervullende projecties met herkenbare beelden worden de zintuigen van uw bewoners geprikkeld. Bijpassend geluid of muziek wordt afgespeeld op het door u ingestelde volume. De SensiView is ook een ideale oplossing voor bedlegerige cliënten.

De SensiView is compact en mobiel en daardoor breed inzetbaar op verschillende afdelingen en leefruimtes. Een groot voordeel van zijn mobiliteit is dat cliënten de beleving kunnen ervaren in hun eigen vertrouwde omgeving. Daarnaast is hij zeer compact en eenvoudig te bedienen.

Hoe werkt de SensiView?

De SensiView heeft een gebruiksvriendelijk bedieningssysteem met simpele knoppen. Hij is standaard uitgerust met 9 verschillende, rustgevende thema's en met één druk op de knop kiest u het gewenste thema. Het is ook mogelijk om via een USB-stick persoonlijke foto's, video's en/of muziek af te spelen. Door het slimme kantelsysteem is de projector verstelbaar en kan er zowel op het plafond als op wanden worden geprojecteerd. De projectie kan worden aangepast naar het oppervlak.

Standaard zijn 9 thema's beschikbaar: boswandeling, onderwater wereld, wolkenluchten, sterrenhemel, treinreis, vlindertuin, strandwandeling, mandala's en winterwandeling.

Maten: 51 x 58,5cm, hoogte 68cm. Gewicht 26kg.

Aan de slag met de SensiView

Knoppen op de projector

Aan: inschakelen van de projector

Uit: uitschakelen van de projector

Led: dit lampje geeft aan of de projector aan of uit staat

Projectiehoek: hiermee kan de beeldprojectie worden gecorrigeerd

Focus: hiermee kan het beeld scherp gesteld worden

Knoppen in het menu

Menu

9 keuze knoppen

V-: volume zachter

V+: volume harder



Gebruiksaanwijzing

Starten en afsluiten

Starten

Om de SensiView te starten moet de AAN knop kort ingedrukt worden. Het LED lampje op de projector gaat dan branden. De projector is helemaal opgestart als u het standaard menu in beeld ziet.

Let op! druk de AAN knop maar 1 keer in, de projector heeft een opstarttijd dus het duurt even totdat deze projecteert.

Afsluiten

Druk kort op de UIT knop, het LED lampje begint te knipperen. De projector sluit zich vanzelf af maar moet eerst afkoelen. De muziek wordt direct afgesloten. Hij is helemaal juist afgesloten als het LED lampje niet meer brandt.

PAS OP: Haal de stekker van de SensiView pas uit het stopcontact als het LED lampje op de projector niet meer brandt, de projector moet even afkoelen. Dit is belangrijk voor de levensduur van de lamp.

Beeld afstellen

De volgende stap is het instellen van de hoek van de projectie. Dit kan door middel van de knop aan de linkerkant van het apparaat. Deze moet los gedraaid worden en dan kan de hoek waarin de projector projecteert worden bepaald. Wanneer de juiste hoek gevonden is moet de knop weer worden aangedraaid om de projector te vergrendelen.

Beeld correctie

Het beeld van de projectie kan aangepast worden aan de hoek waarin geprojecteerd wordt. Dit kan doormiddel van de ronde draaiknop boven op de projector. Dit is niet noodzakelijk maar zorgt wel voor een mooier weergave van het beeld.

Thema kiezen

De thema's staan op de bijgeleverde usb-stick. De usb-stick moet aan de binnenzijde, aan de voorkant van de SensiView worden ingestoken. Zonder usb-stick kan er geen beeld worden geprojecteerd.

Wanneer de usb-stick is ingestoken krijgt u het standaard keuzemenu in beeld. Alle thema's komen dan één voor één voorbij. U kunt een van de thema's selecteren via een van de 9 knoppen. Bij het starten van de projectie start ook automatisch het geluid.

Wilt u een andere usb-stick afspelen? Schakel de projector uit. Wanneer deze volledig is uitgeschakeld kunt u de usb-stick verwijderen en een andere insteken. Start de projector daarna opnieuw op.

Barry Emons Aangepast spelmaterial B.V.
Hoefslag 11
5411 LS Zeeland
Tel nr: (+31) 0486 45 26 26
E-mail: info@barryemons.nl

www.barryemons.nl